

# ZOLL AED 3™

## Przewodnik przeprowadzania akcji ratunkowej

### 10 Jeśli defibrylacja nie jest zalecana lub jeśli przeprowadzono defibrylację, „Rozpocznij RKO”

Podczas uciskania klatki piersiowej urządzenie ZOLL AED 3 będzie emitowało komunikaty asystenta Real CPR Help® w celu zapewnienia prawidłowych uciśnień RKO.

### 1 Włącz urządzenie AED



### 2 „Sprawdź odruchy”



### 3 „Wezwij pomoc”




### 4 „Udrożnij drogi oddechowe”




### 5 „Sprawdź oddech”

### 6 „Jeśli to dziecko, naciśnij przycisk Dziecko”

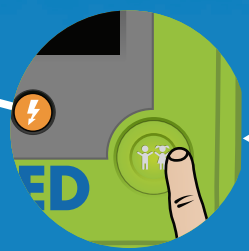

### 7 „Przymocuj elektrody do klatki piersiowej pacjenta”

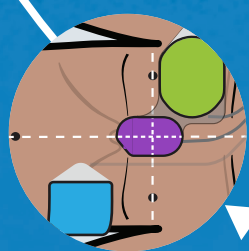

### 8 „Nie dotykaj pacjenta. Analizowanie”



### 9 Jeśli zalecana jest defibrylacja, „Naciśnij migający przycisk defibrylacji”



Więcej informacji na temat modelu urządzenia ZOLL AED 3 można znaleźć na stronie [zoll.com/aed3](http://zoll.com/aed3).

# ZOLL®