



ЯК КОНТРОЛЮВАТИ КРОВОТЕЧУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАРЛІ CELOX⁺™ RAPID


Неконтрольована кровотеча є причиною понад 35% догоспітальних смертей¹

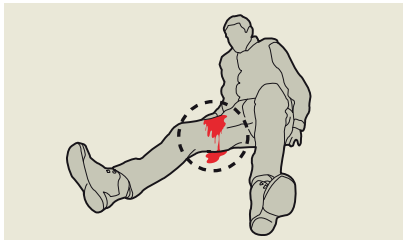

1. Визначте катастрофічну кровотечу

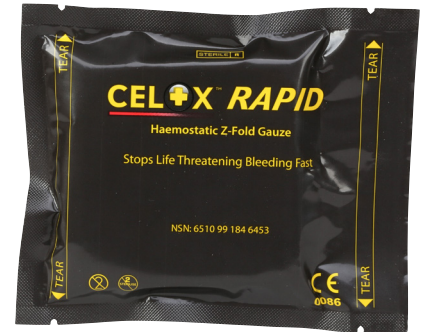

2. Оголіть рану – розріжте або розірвіть одяг, що закриває рану

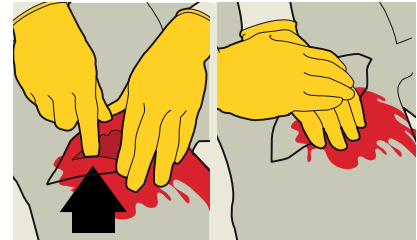

3. ІВизначте місце кровотечі та натисніть



4. Витріть надлишок крові



5а. Нанесіть на джерело кровотечі – на пакеті є чотири відірвні смужки, по одній у кожному куті




5б. Нанесіть на джерело кровотечі – розкрийте упаковку, візьміть один кінець марлі, продовжуючи тиснути




5с. Нанесіть на джерело кровотечі – щільно накладіть марлю Celox Rapid, що розгортається, безпосередньо на джерело кровотечі. Накладіть марлю Celox Rapid, поки рана не заповниться вище рівня шкіри. Надлишки марлі можна відрізати або відірвати



6. Сильно натискайте впродовж 60 секунд або поки кровотеча не зупиниться²

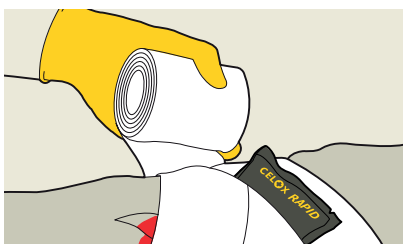

7. Закріпіть пов'язкою для продовження тиску на рану, і викиньте залишки марлі Celox Rapid

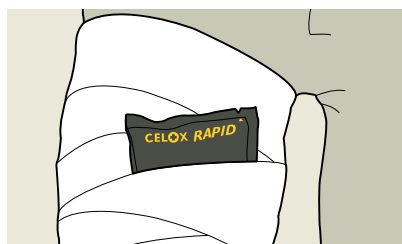

8. Відправте постраждалого на наступний етап надання допомоги

ПОДУМАЙТЕ ПРО КАТАСТРОФІЧНУ КРОВОТЕЧУ

<C> = КАТАСТРОФІЧНА КРОВОТЕЧА

A = ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

B = ДИХАННЯ

C = ЦИРКУЛЯЦІЯ КРОВІ

D = ІНВАЛІДНІСТЬ

E = ОГОЛЕННЯ

www.paramedyk.pl

Повна інформація, попередження та інструкції з видалення вказані в інструкції виробника з використання.

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. *J Trauma* 60, S3-11.

2. Celox Rapid is indicated to stop life threatening bleeding with a compression time of 60 seconds or until bleeding stops.

Hoggarth A, et al. Testing a new gauze hemostat with reduced treatment time. Poster presentation at ATACCC, Ft Lauderdale, August 2011.

Copyright © 2022 Medtrade Products Ltd. CELOX⁺™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.