


ЯК КОНТРОЛЮВАТИ КРОВОТЕЧУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАРЛІ CELOX™


Неконтрольована кровотеча є причиною понад 35% догоспітальних смертей¹



1. Визначте катастрофічну кровотечу

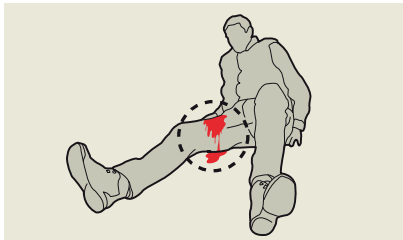

2. Оголіть рану – розріжте або розірвіть одяг, що закриває рану

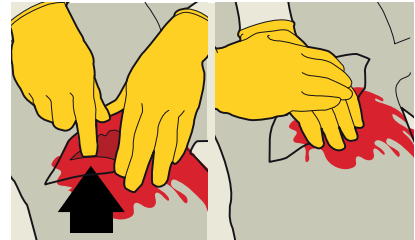

3. Визначте місце кровотечі та натисніть



4. Витріть надлишок крові




5a. Нанесіть на джерело кровотечі – на пакеті є відривна смужка у правих кутах




5b. Нанесіть на джерело кровотечі – розкрийте упаковку, візьміть один кінець марлі, продовжуючи тиснути



5c. Нанесіть на джерело кровотечі – щільно накладіть марлю Celox, що розгортається, безпосередньо на джерело кровотечі. Накладайте марлю Celox, поки рана не заповниться вище рівня шкіри. Надлишки марлі можна відрізати або відірвати

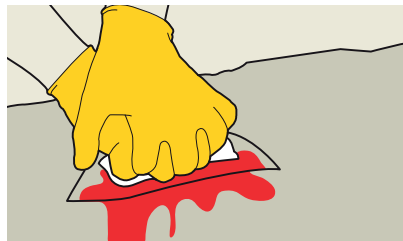

6. Сильно натискайте впродовж 3 хвилин або поки кровотеча не зупиниться

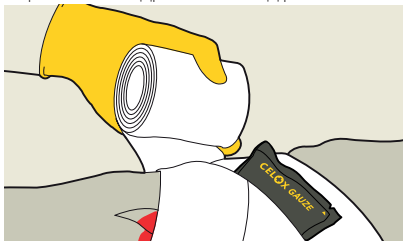

7. Закріпіть пов'язкою для продовження тиску на рану, і викиньте залишки марлі Celox



8. Відправте постраждалого на наступний етап надання допомоги

ПОДУМАЙТЕ ПРО КАТАСТРОФІЧНУ КРОВОТЕЧУ

<C> = КАТАСТРОФІЧНА КРОВОТЕЧА

A = ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

B = ДИХАННЯ

C = ЦИРКУЛЯЦІЯ КРОВІ

D = ІНВАЛІДНІСТЬ

E = ОГОЛЕННЯ

www.paramedyk.pl

Повна інформація, попередження та інструкції з видалення вказані в інструкції виробника з використання.

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. *J Trauma* 60, S3-11. Copyright © 2022 Medtrude Products Ltd. CELOX™ is a trademark of Medtrude Products Ltd. All rights reserved.