


ЯК КОНТРОЛЮВАТИ КРОВОТЕЧУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ, ЗА ДОПОМОГОЮ АПЛІКАТОРА CELOX™


Неконтрольована кровотеча є причиною понад 35% догоспітальних смертей¹



1. Визначте катастрофічну кровотечу

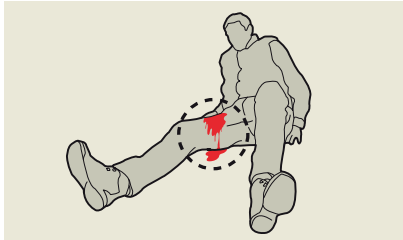

2. Оголіть рану – розріжте або розірвіть одяг, що закриває рану

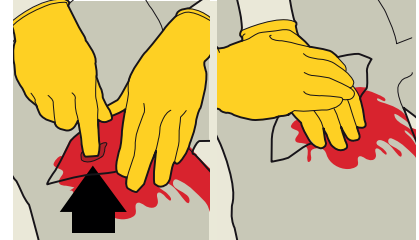


3. Визначте місце кровотечі та натисніть




4а. Дістаньтеся до джерела кровотечі – на пакеті є два надрізи, по одному у кожному верхньому куті



4б. Дістаньтеся до джерела кровотечі – відкрийте упаковку, тримайте аплікатор у пакеті, продовжуючи тиснути

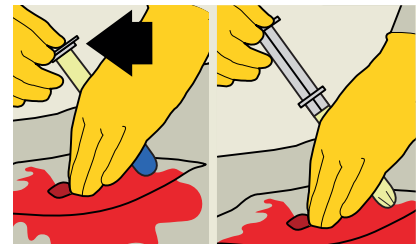


4с. Дістаньтеся до джерела кровотечі – щоб підготувати аплікатор, зніміть торцевий ковпачок з верхньої частини аплікатора та вставте поршень у ствол аплікатора. Коли будете готові до нанесення, зніміть з аплікатора синій торцевий ковпачок

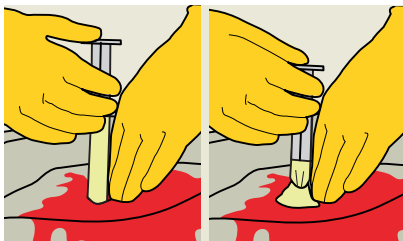

4д. Дістаньтеся до джерела кровотечі – введіть аплікатор з поршнем якомога глибше в рану. Повільно втягніть поршень, витягуючи аплікатор, і випустіть гранули, щоб вони заповнили рану на рівні вище шкіри. За потреби можна використовувати додаткові аплікатори або пакети з гранулами



5. Накрийте та міцно натискайте впродовж 5 хвилин або поки кровотеча не зупиниться

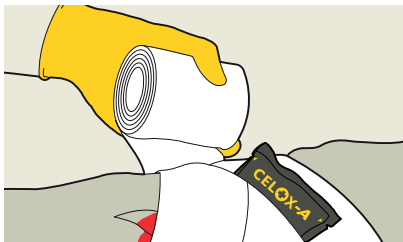

6. Закріпіть пов'язкою, щоб підтримувати тиск, і викиньте невикористаний продукт, що залишився



7. Відправте постраждалого на наступний етап надання допомоги

ПОДУМАЙТЕ ПРО КАТАСТРОФІЧНУ КРОВОТЕЧУ

<C> = КАТАСТРОФІЧНА КРОВОТЕЧА

A = ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

B = ДИХАННЯ

C = ЦИРКУЛЯЦІЯ КРОВІ

D = ІНВАЛІДНІСТЬ

E = ОГОЛЕННЯ

www.paramedyk.pl

Повна інформація, попередження та інструкції з видалення вказані в інструкції виробника з використання.

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. *J Trauma* 60, S3-11. Copyright © 2022 Medtrade Products Ltd. CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.